

NEU

Femtest® Frühtest

Bis zu
6 TAGE VOR
Ausbleiben der Periode testen

Der **NEUE** Femtest® Frühtest kann das Schwangerschaftshormon **bis zu 6 Tage vor** Ausbleiben der Periode messen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Anwendung durch.

ANWENDUNGSHINWEISE

WANN TESTEN?

Sie können mit Femtest® Frühtest bereits bis zu 6 Tage vor Ausbleiben der Periode testen.

Tag der erwarteten Periode						Tag der ausbleibenden Periode		
24	25	26	27	28	1	2	ZYKLUSTAGE	
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	TAGE VOR DER AUSBLEIBENDEN PERIODE	
76%	96%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	% SCHWANGERE FRAUEN, BEI DENEN DER TEST EIN POSITIVES ERGEBNIS ANZEIGT	
TESTBEGINN								

Klinische Studien zeigen ab dem Zeitpunkt der erwarteten Periode eine 99%ige Zuverlässigkeit. Lesen Sie zunächst die Gebrauchsanweisung. Wenn Sie bereit sind, den Test durchzuführen, entfernen Sie die Schutzfolie und ziehen Sie die rosa Schutzkappe ab.

SCHRITT 1 DURCHFÜHRUNG DES TESTS

1. Testen Sie direkt im Urinstrahl

Halten Sie den Test mit dem Urinabsorber nach unten für **5 Sekunden** direkt in den Urinstrahl.
2. **ODER** Sammeln Sie etwas Urin in einem sauberen, trockenen Becher.

Halten Sie den Urinabsorber vollständig für **5 Sekunden** in den Urin.

Achten Sie darauf, dass während des Tests der Urinabsorber nicht nach oben zeigt.

SCHRITT 2 WARTEN SIE 3 MINUTEN

Stecken Sie die rosa Schutzkappe wieder auf den Test und legen Sie den Test nun mit dem Testfenster nach oben zeigend auf eine gerade Fläche.

Warten Sie **3 Minuten**, bis Sie das Ergebnis ablesen.

SCHRITT 3 ABLESEN DES ERGEBNISSES

SCHWANGER

Es erscheinen zwei rosa Striche im Ergebnisfenster. **Es ist möglich, dass ein Strich deutlich heller ist als der andere.** Dies bedeutet dennoch, dass das Ergebnis positiv ist.

NICHT SCHWANGER

Ein rosa Strich erscheint im Ergebnisfenster.

Es sollte mindestens ein Strich sichtbar sein. Erscheint kein Strich im Testfenster, hat der Test nicht funktioniert und das Ergebnis ist nicht aussagekräftig. Möglicherweise war nicht genügend Urin auf dem Urinabsorber. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Femtest® Frühtest und folgen Sie dabei genau der Gebrauchsanleitung. **Das Ergebnis sollte so schnell wie möglich nach der Wartezeit von 3 Minuten abgelesen werden. Nach 10 Minuten sollte das Ergebnis nicht mehr ausgewertet werden.**



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wie funktioniert der Femtest® Frühtest?

Der Femtest® Frühtest misst die Konzentration des Schwangerschaftshormons humanes Choriongonadotropin (hCG), das bei schwangeren Frauen im Urin vorhanden ist. Dieses Hormon wird gebildet, sobald eine Schwangerschaft besteht. Es wird in der Plazenta kurz nach Einnistung der Eizelle freigesetzt. Die Hormonkonzentration steigt dabei gerade zu Beginn der Schwangerschaft stark an. Die Konzentration des Hormons kann variieren. Da Femtest® Frühtest verschiedene Formen des Schwangerschaftshormons nachweist, kann er so genau und zuverlässig eine Schwangerschaft feststellen.

Ab wann kann der Femtest® Frühtest angewendet werden?

Dank seiner hohen Sensitivität kann der Femtest® Frühtest das Hormon hCG bereits bis zu 6 Tage vor Ausbleiben der Periode nachweisen. Bei manchen Frauen reicht die nachweisbare Menge des Hormons hCG zu einem so frühen Zeitpunkt noch nicht aus, um mit Femtest® Frühtest einen zuverlässigen Nachweis zu erbringen. Die Menge des Schwangerschaftshormones steigt im Laufe der Schwangerschaft an. In klinischen Studien hatten 76 % der schwangeren Frauen 6 Tage vor Ausbleiben der Periode (5 Tage vor Fälligkeit der Periode) einen hCG-Wert, der hoch genug war, um mit dem Femtest® Frühtest das Ergebnis 'schwanger' zu ermitteln. Der Femtest® Frühtest kann zu jeder Tageszeit angewendet werden. Eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme vor dem Testen kann die Konzentration des Schwangerschaftshormons verdünnen. Trinken Sie daher nicht mehr als nötig, bevor Sie testen. Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen, ist es empfehlenswert, den ersten Morgenurin zu verwenden.

Was ist die Früherkennungs-Technologie?

Die Früherkennungs-Technologie ermöglicht es dem Femtest® Frühtest niedrige Konzentrationen des Schwangerschaftshormons zu erkennen, insbesondere der frühen Variante des Schwangerschaftshormons. Diese besondere Technologie ermöglicht es dem Femtest® Frühtest eine Schwangerschaft sehr früh und mit einer sehr großen Genauigkeit festzustellen.

Wie zuverlässig ist der Test?

In klinischen Studien konnte eine Zuverlässigkeit mit dem Femtest® Frühtest von über 99 % ab dem Tag der erwarteten Periode gezeigt werden.

Wann soll ich das Ergebnis lesen?

Das Testergebnis sollte so rasch wie möglich nach der 3-minütigen Wartezeit abgelesen werden. Nach 10 Minuten ist das dann angezeigte Ergebnis unter Umständen nicht mehr aussagekräftig und sollte somit nicht mehr ausgewertet werden.

Ich habe länger als 3 Minuten gewartet, es ist jedoch kein Strich im Testfenster erschienen. Stimmt etwas nicht?

Ihr Testergebnis sollte innerhalb von 3 Minuten aufscheinen. Es sollte zumindest ein rosa Strich im Testfenster nach 3 Minuten sichtbar sein, um anzuzeigen, dass der Test abgeschlossen ist und Sie ihn laut Gebrauchsanweisung durchgeführt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Test ungültig. Möglicherweise ist nicht genug Urin auf den Absorber gelangt oder der Absorber wurde nicht mit der Spitze nach unten gehalten. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Femtest® Frühtest und folgen Sie dabei genau der Gebrauchsanweisung.

Was tue ich, wenn das Ergebnis positiv ist (Schwanger)?

Wenn der Test ein positives Ergebnis (schwanger) anzeigt, wurde das Schwangerschaftshormon (hCG) im Urin festgestellt, das normalerweise eine Schwangerschaft anzeigt. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Arzt aufzusuchen, um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen. Sollte Ihr Test positiv sein, Sie jedoch glauben, nicht schwanger zu sein, sollten Sie Ihren Arzt ebenfalls aufsuchen.

Was tue ich, wenn das Ergebnis negativ ist (Nicht schwanger)?

Sie sind wahrscheinlich nicht schwanger oder Ihr hCG-Wert ist noch nicht hoch genug, um durch den Test festgestellt werden zu können. Vielleicht haben Sie sich bei der Bestimmung des Tages, an dem Ihre Periode fällig ist, verrechnet. Wenn Sie ein negatives Ergebnis erhalten und Sie dennoch das Gefühl haben schwanger zu sein, wiederholen Sie den Test mit einem neuen Femtest® Frühtest in den nächsten Tagen. Falls das Ergebnis nach wie vor negativ sein sollte und Ihre Periode immer noch nicht eingetreten ist, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Warum habe ich ein positives Ergebnis und meine Periode hat eingesetzt?

Es besteht trotz positivem Ergebnis die Möglichkeit, dass Ihre Periode einsetzt. In der Zeit zwischen der Ovulation und dem Tag des Ausbleibens der Periode kann in Ihrem Körper viel passieren. In den ersten Wochen nach Einnistung kann ein signifikant höheres Risiko auftreten, dass die Schwangerschaft nicht endgültig vom Körper angenommen wird. Eine Frau kann bei einem ersten Frühtest ein positives Testergebnis haben und ein paar Tage danach ein negatives Ergebnis. Femtest® Frühtest zeigt ein positives Ergebnis zu einem sehr frühen Zeitpunkt an, weil das Vorhandensein des Schwangerschaftshormons gemessen wird. Wir empfehlen daher, am Tag der erwarteten Periode mit einem Femtest® Express den Test zu wiederholen, um das Ergebnis zu bestätigen.

Kann ich ein positives Testergebnis aufbewahren?

Ein positives Testergebnis bleibt unverändert sichtbar und wenn Sie möchten, können Sie den positiven Test herzeigen oder sogar als Erinnerung z. B. für ein Babyalbum aufbewahren.

Können Medikamente das Ergebnis beeinflussen?

Arzneimittel, die das Schwangerschaftshormon humanes Choriongonadotropin (hCG) enthalten, können das Ergebnis des Femtest® Frühtests beeinflussen. Andere Arzneimittel zur Fruchtbarkeitsbehandlung (z. B. Clomid), Antibiotika, Alkohol, Schmerzmittel oder die Antibabypille sollten das Ergebnis nicht beeinflussen.

Haben Sie weitere Fragen?

Dann besuchen Sie unsere Website www.femtest.de www.femtest.at

Femtest®

ÜBER FEMTEST®

Im Jahr 1971 kam der erste Femtest® (zunächst unter dem Namen Predictor®) als erster Heimschwangerschaftstest auf den Markt; Femtest® ist ein verlässlicher Partner, um eine bestehende Schwangerschaft festzustellen.

DAS FEMTEST®-SORTIMENT BEINHALTET:

Femtest® Express: Extra schneller Schwangerschaftstest, der Ihnen ab dem Tag Ihrer erwarteten Periode in nur 1 Minute anzeigt, ob Sie schwanger sind oder nicht.

Femtest® Frühtest: Hochsensibler Test, der eine Schwangerschaft bereits bis zu 6 Tage vor Ausbleiben der Periode nachweisen kann.

Femtest® Frühtest Digital: Sagt Ihnen anhand eines klaren YES-/NO-Ergebnisses, ob Sie schwanger sind oder nicht. Mit dem hochsensiblen Femtest® Frühtest Digital lässt sich das Schwangerschaftshormon bereits bis zu 5 Tage vor Ausbleiben der Periode nachweisen. Derzeit nur in Deutschland erhältlich.

LE07396A

Nach Ablauf des Verfallsdatums, aufgedruckt auf dem Boden der Schachtel, nicht mehr verwenden. Trocken lagern. Aufbewahrung bei einer Temperatur von 4 - 30 °C. Nicht einfrieren. Nicht über 30 °C lagern. Nur für in-vitro-Diagnostik. Nicht einnehmen. Der Test ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Entsorgen Sie den gebrauchten Test in einem Abfallbehälter. Nicht in die Toilette werfen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls die Folie beschädigt oder geöffnet sein sollte, verwenden Sie den Test nicht mehr.

Church & Dwight Co., Inc., Ewing, NJ 08628, USA.  Church & Dwight UK Ltd., Folkestone, Kent, England.

Vertrieb DE: Omega Pharma Deutschland GmbH, Benzstraße 25, 71083 Herrenberg

Vertrieb AT: Omega Pharma Austria Health Care GmbH, Rennweg 17, 1030 Wien



0086
Medizinprodukt

